

## Le soir



1

Remplir le doseur / Tenir le flacon à la vertical 20 CM3 0 diluer (Puli jet plus)



4

Introduire les embouts dans le Pulse cleaner en utilisant si nécessaire des adaptateurs



2

Verser dans le pulse-cleaner



5

Laisser agir toute la nuit



3

Ajouter 2.5 litres d'eau chaude

Une fois le produit aspiré entièrement, il faut démonter les aspirations, nettoyer l'intérieur ainsi que les languettes, et passer de la [vaseline](#) sur les languettes ainsi que sur les joints.



Cette étape sera à faire également le matin, après protocole de rinçage des aspirations

## Le matin



Aspirer 2.5 d'eau chaude



Changer les filtres



Vertuo

# Entretien des aspirations



Vertuo