



Stérilisation à froid

La stérilisation à froid doit être appliquée sur les DM fragiles.

Nous l'appliquerons désormais sur les DM suivants :

- Embouts de caméra numérique
- Ecarteurs buccaux

Selon le process suivant :

- 1) Après utilisation, passer un coup de spray Dentasept SH Pro sur le DM et l'essuyer à l'aide d'un papier tork



- 2) Immerger le DM dans le bac de pré-désinfection durant 20 minutes



- 3) Sortir le DM du bac, le rincer à l'eau claire

- 4) Placer le DM dans le thermolaveur et lancer le cycle de nettoyage
- 5) Sortir le DM, le placer dans un bac propre, et l'immerger avec le produit Dentasept ULTRA (ce produit s'utilise PURE). Laisser le immerger durant 1h



- 6) Au bout d'une heure, sortir le DM, le rincer, le sécher à l'aide d'un papier Tork
- 7) Placer le DM dans un sachet de gaine de stérilisation

- 8) Etiqueter le DM selon le process suivant :
 - a. Date
 - b. Nom de la personne ayant conditionner le DM
 - c. Type de stérilisation : stérilisation à froid
 - d. Nom du produit : Dentasept ULTRA
 - e. Date de péremption du sachet : 1 mois après mise sous sachet

